

1. コグニバイク製品ページへのアクセス
 弊社 HP の製品案内からコグニバイクのページを開きます。登録は一般の PC からも行えます。
 コグニバイク製品ページアドレス↓
<http://www.irc-web.co.jp/cognibike/index.html>




2. カスタマー登録
 最新ソフトのダウンロードにはカスタマー登録が必要になります。製品ページ株式会社よりカスタマー登録を行います。



3. ユーザー情報の入力

フォームに必要事項を入力の上、送信するボタンを押してください。登録したアドレスにアップデートソフトの入手先の情報が送付されます。

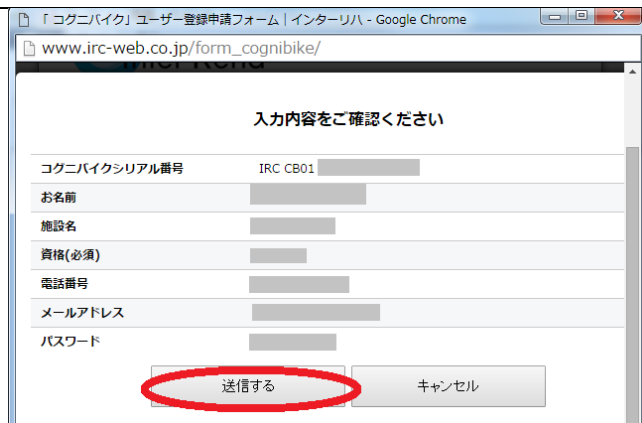

4. スタッフ専用ページへのアクセス

送付されたメール内のログイン ID,パスワードを控ええます。データのダウンロードはコグニバイク本体、一般の PC のどちらからでも行えますのでお客様の利用状況に合わせて下記どちらかの手順を行います。

a) 一般の PC にデータをダウンロードしたい場合
→ このままメール内のリンクをクリックして手順 6 へ進んでください。コグニバイクへのデータの移動には USB が必要になります。

b) コグニバイク上で作業を行いたい場合
→ コグニバイクがインターネットに接続している必要があります。接続を確認後、手順 5 にお進みください。

コグニバイクユーザー登録申請ありがとうございました

インターリハ 太郎 様

この度は、「認知症予防エルゴメーター-コグニバイク」をご購入及びご登録いただき、誠に有難うございます。
ご登録申請いただいたユーザー様に対して、ソフトウェア(ファームウェア)のバージョンアップに関するお知らせをご連絡させていただきますので、今後ともよろしくお願ひ致します。
下記ユーザー専用ページで、バージョンの確認及び最新版のソフト、マニュアルのダウンロードが行えるようになっております。

http://www.irc-web.co.jp/cognibike/customer_service/staff/

ログインID:

パスワード:

今後とも、インターリハ株式会社(<http://www.irc-web.co.jp>)をご愛顧願ひますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

<個人情報取り扱いについて>

インターリハ株式会社(以下、当社といいます。)のウェブサイト上の入力フォームまたは電子メールを通して、お客様から当社が提供を受けたお客様の個人情報は、本個人情報取り扱い方針にしたがい取り扱います。
当社は、お客様の個人情報を取得、保有、使用、開示する場合において、当該お客様の権利利益を損なうことの無いよう努めます。

ご登録申請内容

[コグニバイクシリアル番号] IRC CB01 QQQQQQ 0001

[お名前] インターリハ太郎

[施設名] 東京本社

[資格(必須)] その他

[電話番号] 03-5974-0231

5. コグニバイク本体からのアクセス




コグニバイク本体を起動後、メニュー画面から

→ パターンエクササイズ

→ コグニバイクページ


→ ご施設様向けインフォメーション

の順にボタンをタッチしてください。

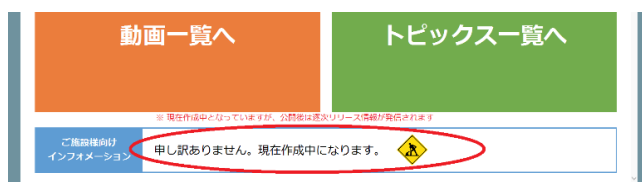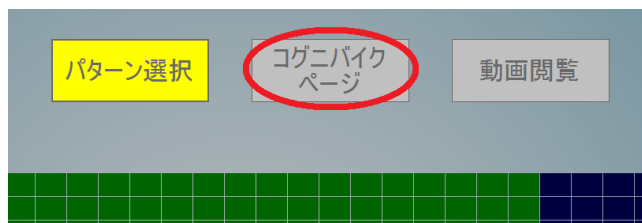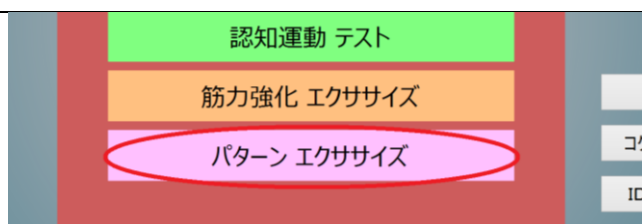

6. ID,パスワードの入力

手順4のメール内のID、パスワードを求められますので、入力後ログインボタンを押します。



認証が必要

http://www.irc-web.co.jp サーバーでは、ユーザー名とパスワードが必要です。サーバーからのメッセージ:
Protected Area

ユーザー名:

パスワード:

ログイン キャンセル

7. アップデート情報の確認

ログイン後、アップデート情報を開いて入手したいソフトを選び、該当する ver 番号を押してください。



Inter Reha スタッフ専用ページ Cogni

最新アップデート情報は **こちら**

データファイルのアップロードは **こちら**

Inter Reha スタッフ専用ページ

アップデート情報

更新日	ソフトウェア	マニュアル	入力用ソフト	アップデート手順
最新	ver2.4.1	ver1.0.0	—	ver1.0.0
2016/01/12	ver2.4.1	ver1.0.0	—	ver1.0.0

8. 申請情報の入力

お客様のご利用状況を確認するため、お手数ですがフォームに従って情報を記入して送信するを押してください。

なお、コグニバイクのシリアル番号は本体の土台部分のフレームに貼付されております。



シリアル番号の記載場所



Inter Reha

最新ファイルをダウンロードするには、下記情報をご入力ください。

必須 会社名 OK

必須 施設名 OK

必須 担当者名 OK

必須 シリアル番号 OK OK

必須 ファイル ソフトウェア Ver 2.5.0
 マニュアル Ver 1.0.0
 アップデート手順 Ver 1.0.0

送信する

補足1. コグニバイク上での文字入力に関して
ログイン情報を入力する際、タッチパネルのキーボードが表示されない場合は下記手順に従ってキーボードを表示することができます。

- 画面左上、メンテナンスボタンをタッチ
- 入力欄をタッチしてキーボードを表示
- キャンセルボタンを押して元のページに戻る
- ログイン情報の入力欄をタッチして入力



上記手順でうまくいかない場合はお手数ですが下記にお問合せ下さい。宜しくお願い致します。

コグニバイク サポートダイヤル：0120-592-819

インターリハ株式会社（本社）：03-5974-0231