

取扱説明書

LEA.Pad plus®

Let's eat with your Power, with your LEA.Pad

Inter Reha
Advanced Rehabilitation and Healthcare

本製品はベッドでの体位変換を目的とした商品です。


保証書付き

このたびはリーパッドをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
この説明書には、リーパッドを正しく安全にお使いいただくための注意事項を記載しています。

- 正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずよくお読みください。
- 必要なときに読めるように、大切に保管してください。
- 必ず専門家（医師、看護師、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士など）の指導の上で、正しくご使用ください。
- 使用中に異常を感じたり不安を感じた場合には、使用を中止し、専門家にご相談ください。

品名 リーパッドプラス

各部の名称と付属品

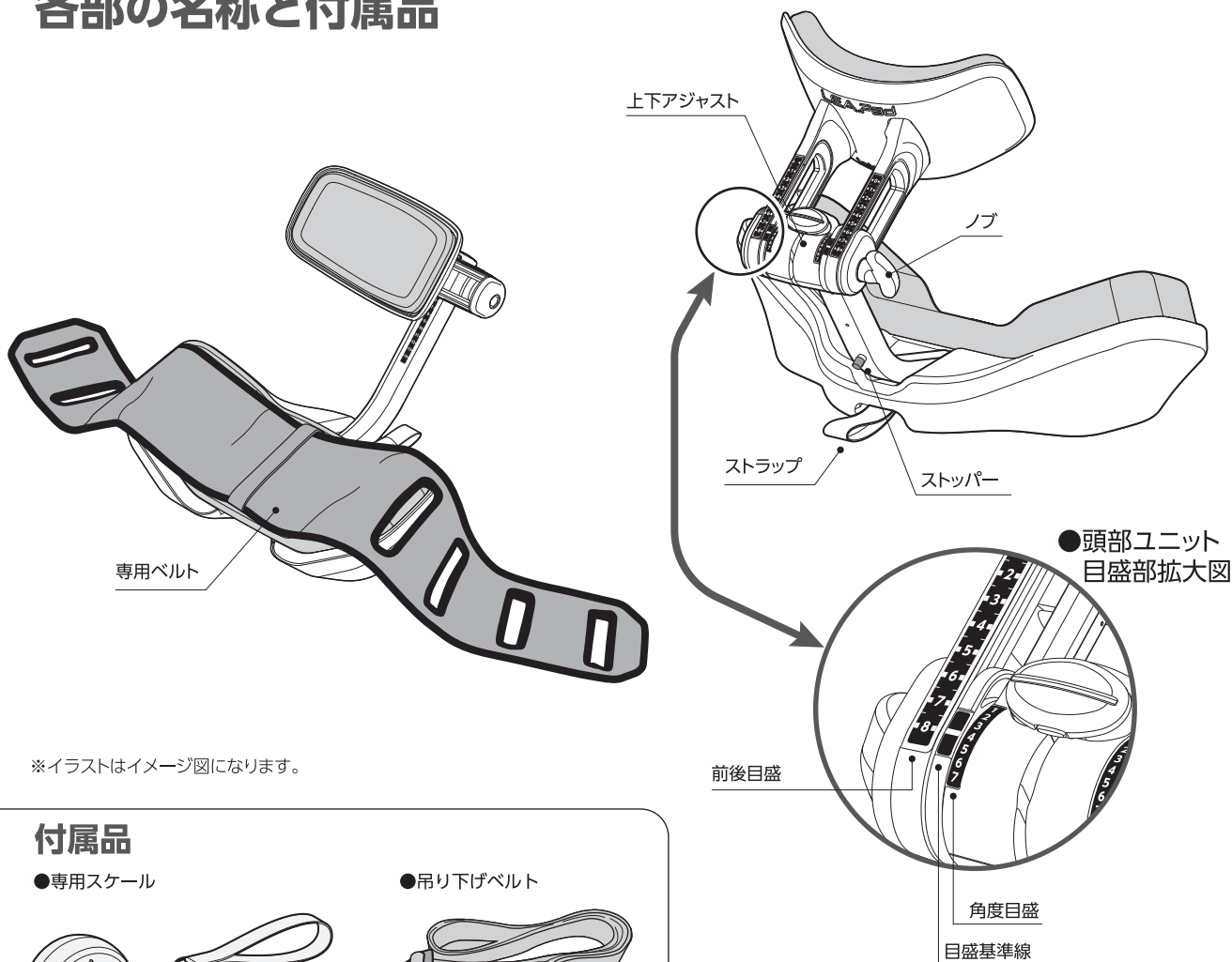


※イラストはイメージ図になります。

付属品

●専用スケール

●吊り下げベルト

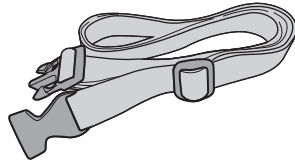

●本体サイズ：約幅 46cm×高さ 38cm×奥行き 42cm

●重量：約 2.1Kg

注意事項は誤った取扱いをすることによって生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさや切迫の程度に応じて「警告」と「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。注意表示については詳しい説明は下記のとおりです。内容をよく理解してから、本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重症を負う可能性が想定されている内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

守っていただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

安全上のご注意

必ずお守りください。

ご使用になる前に必ずお読みください。内容をお確かめの上、使用中は大切に保管してください。



■専用ベルトは必ず正しい位置と向きでご使用ください。



■お守りください


ベルトは左右均等に広げ、本体と水平にしてご使用ください。



■お止めください

ベルトがよじれていたり左右の長さがズレた状態でのご使用はお止めください。

ズレた状態で
使用しない!

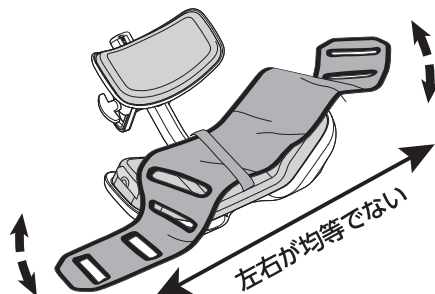


■リーパッドは必ず正しい向きでご使用ください。横向きや斜めでの使用は誤嚥や窒息、褥瘡悪化の恐れがあります。



■お守りください

製品と人が正しい向きにしてご使用ください。

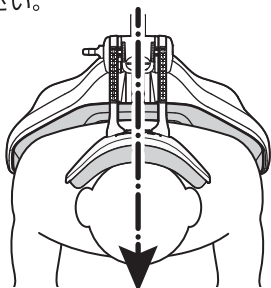

■お止めください

製品が傾いていたり、ズレた状態でのご使用はお止めください。

ズレた状態で
使用しない!




■リーパッドは必ずクッションをつけて、しっかりとノブを締めた状態で使用してください。




■お守りください

クッションが本体にきちんと固定されていることを確認してください。

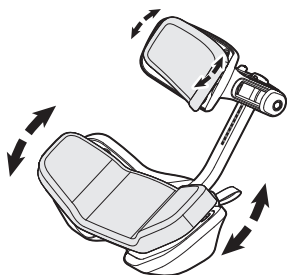

■お守りください

ノブをしっかりと締め、頭部ユニットが下に向いたり、上下、前後に動かないことを確認してください。

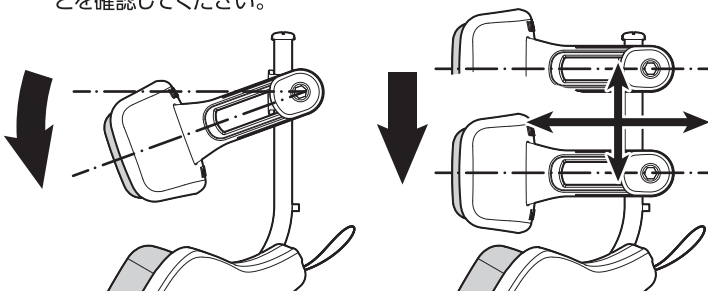

けいこく
警告

- 身体に無理のかかる体位での使用はおやめください。
- 頭部、肩甲骨部の体位変換、保持以外の用途にはご使用にならないでください。
- 火気や鋭利なものは近づけないでください。破損の原因となります。
- 洗浄や保管をする場合は、取扱説明書の説明に従ってください。
- 保管時は紫外線での劣化を防ぐため、直射日光の当たる場所は避けてください。
- 水洗い、洗濯機の使用は絶対にしないでください。破損の原因となります。



ちゅうい
注意

- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 火のそばや高温になる場所には置かないでください。
- お子様の手が届かない安全な場所に保管してください。
- 本品は改良等の目的にて仕様、デザインなどを予告なしに変更する場合があります。

リーパッドの各部の機能について

頭部ユニット

頭部ユニットは使用される方に合わせて前後・角度・上下の調整が可能です。
目盛の数値を利用して前回と同じポジションが再現できます。

1
2
3
4
5
6
7

0
1
2
3
4
5
6
7
8

角度目盛

前後目盛

目盛基準線

上下目盛

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14


ノブを緩めることで、調整できます。

前後	0~8センチ
角度	1~7ポジション

上下	0~14センチ
----	---------


ストッパー

ストッパーは頭部ユニットの落下防止用です。普段使う位置のすぐ下に取り付けてください。

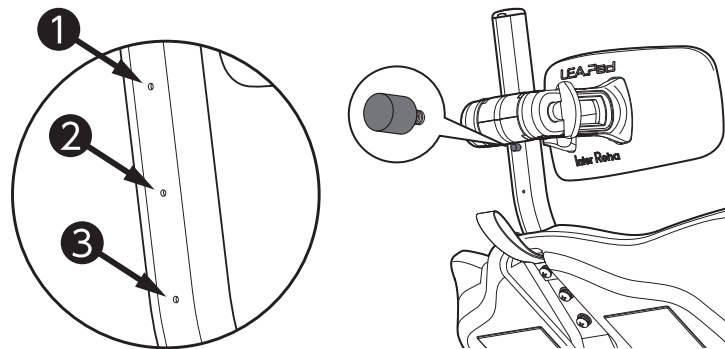


吊り下げベルト

吊り下げベルトをストラップに通すことで本製品の保持や保管が可能です。

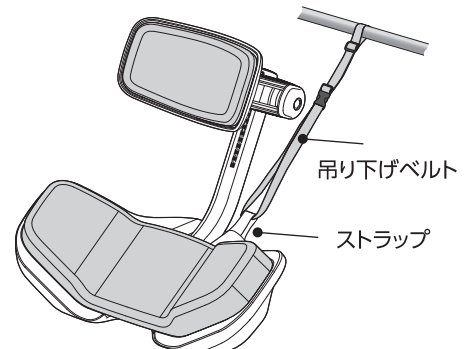

頭部・背部クッション

クッション部はスナップボタン式で取り外しが可能です。
取り外す際は1箇所ずつ外してください。

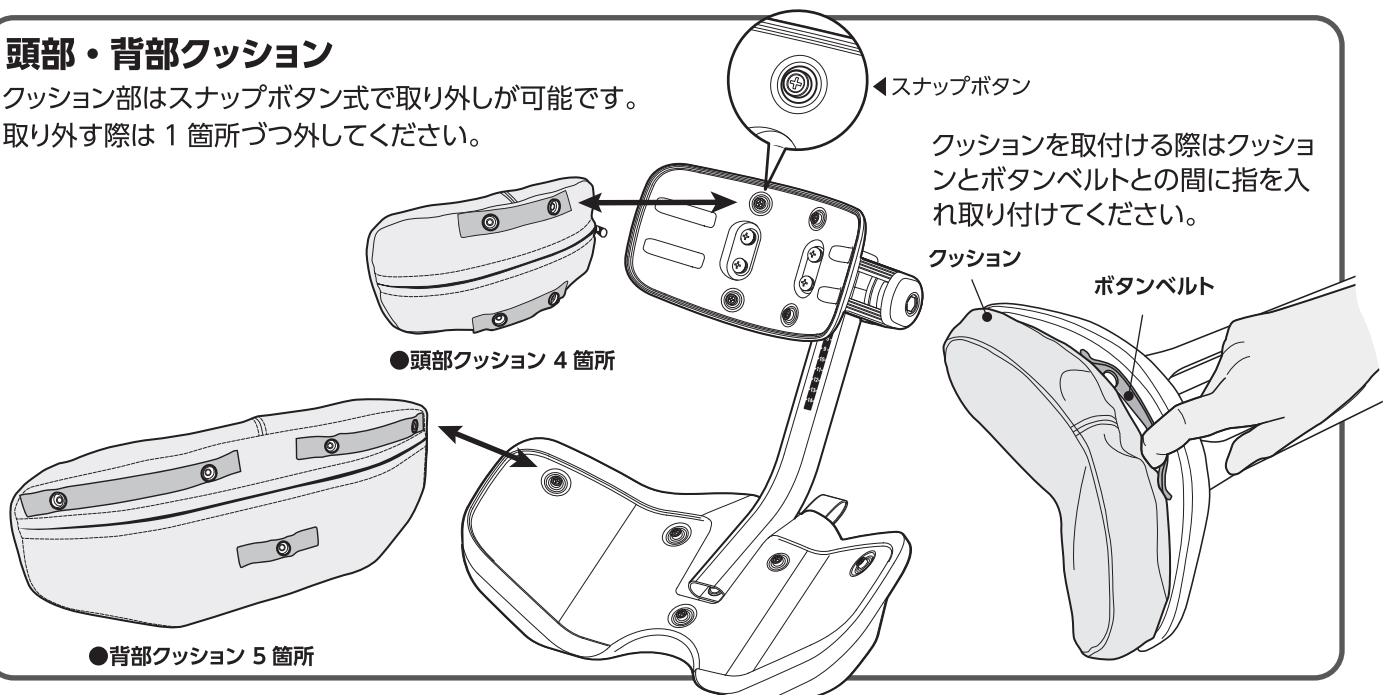

リーパッドプラスの使用法

- 一般の方は必ず専門家（医師、看護師、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士など）の指導の上で、正しくご使用ください。
- 使用中に異常を感じたり不安を感じた場合には、使用を中止し、専門家にご相談ください。

1 リーパッドプラスをセットします。



2 膝を屈曲します。



3 骨盤を手前側に移動します。




4 ベルトを利用者に固定します。
片側は肩も含めた固定、
片側は脇の下を通す固定となります。



5 ベルトの穴に通します。



6 ベルトの固定は終了です。

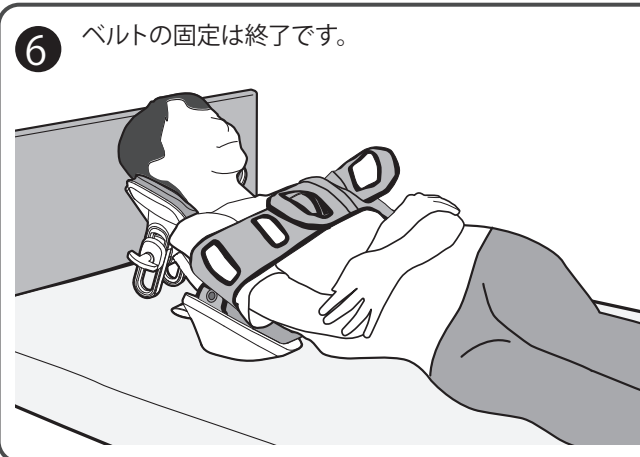

7 ベルトを持ち垂直方向に引き上げます




8 横向きになったらベルトを外します。



頭部ユニットの調整方法について


① 頭部ユニットの調整

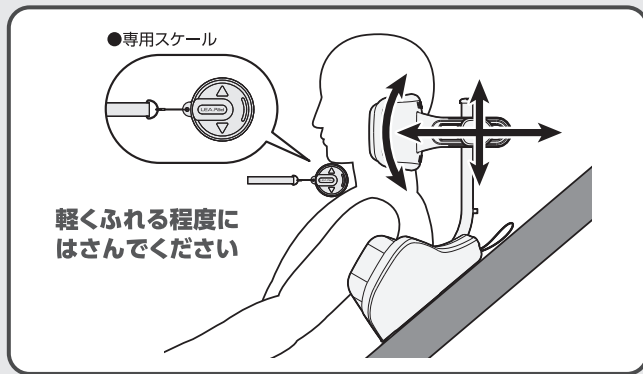

専用スケールをあごと鎖骨のくぼみに軽くはさみながら頭部パッドの位置を調整します。

※あくまで目安ですので、必ず毎回、使用者に痛みや息苦しさがないか、確認を取ってからご使用ください。

② 頭部ユニットの確認

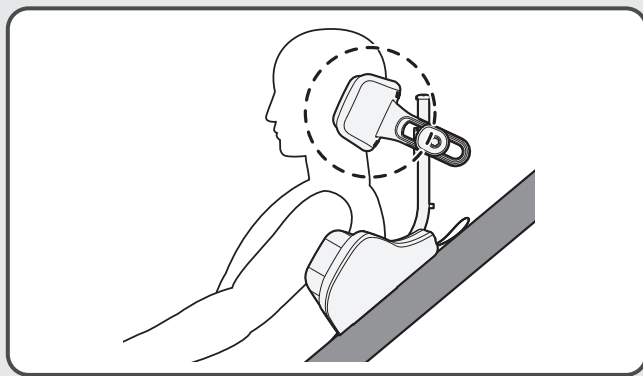


頭部パッドは後頭部のやや下に、頭部支柱が上向きになるように当てると頭部が安定します。

お願い

調整後は数値が動かないようにきちんとノブを締め付けて、ガタが無いことを確認してください。

③ 調整数値の記録

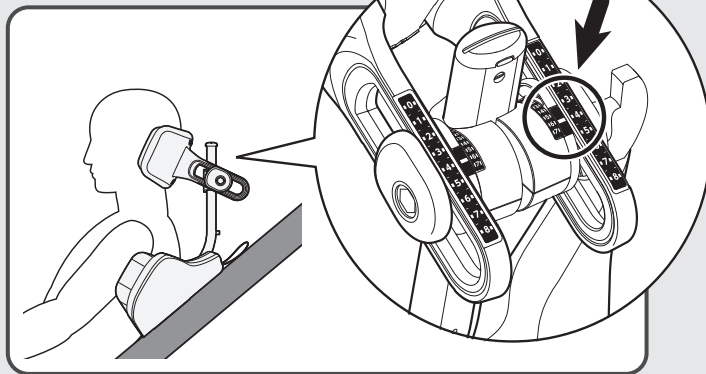


次に使用する際の目安として調整数値を記録してください。

〇〇〇〇 様	2018年3月30日	
上下	前後	角度
10 センチ	7 センチ	4 ポジション
メモ		

※取説7ページに目盛シートがあります

④ ご使用後は

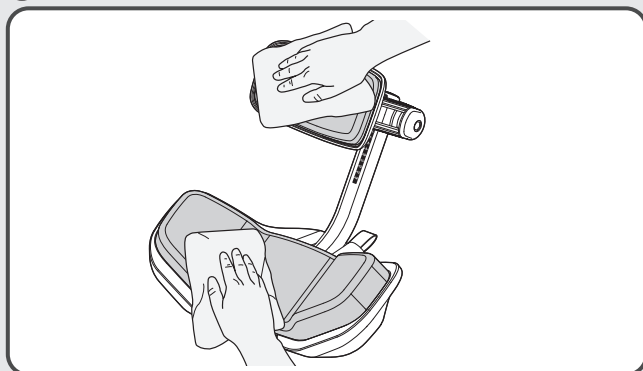


使用後は必要に応じてクッションの汚れを清掃してから保管してください。

※清掃方法は6ページのお手入れを参照してください。

お手入れ

日常的なお手入れ

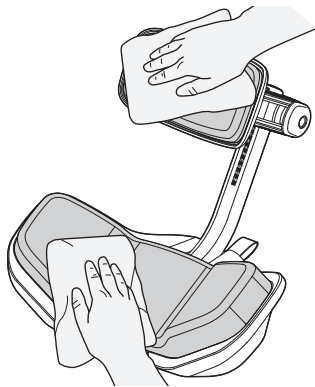

●中性洗剤


- 表面部を水または中性洗剤で清潔な布で拭き取るようにしてください。

お願い


揮発性のもの(シンナー・ベンジン・ガゾリンなど)やクレンジールは使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。

汚れが染み込んだ場合

●カバー

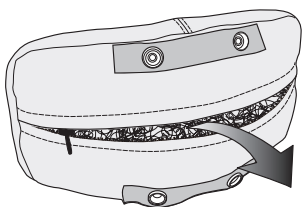

●中材

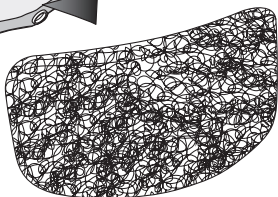

- クッションを本体から取り外し、ファスナーを開けて中材を取り出してください。
- カバーと中材は中性洗剤等で手洗いをしてください
- 洗浄後は水ですすぎをして、影干しで完全に乾燥してからクッション内に中材を入れてください。

お願い

嘔吐や血液などが付着した場合は、洗浄後に必ず消毒を行ってください。

消毒する際は

- 消毒剤を使用する場合は、必ず下記の指定の濃度を守って使用してください。また、各消毒剤の取扱い方法に従って使用してください。

消毒剤	濃度
消毒用エタノール	76.9～81.4%
イソプロパノール	70%
塩化ベンザルコニウム(オスバンなど)	0.05～0.2%
塩化ベンゼトニウム(ハイアミンなど)	0.05～0.2%
グルコン酸クロルヘキシジン(ヒビテンなど)	0.05%

保管

- 汚れを取り除いてから、よく乾燥させて保管してください。
- 高温、多湿、直射日光の当たる場所では保管しないでください。変形や変色の原因となります。
- 重量物を乗せた状態で保管しないでください。ヘタリや変形の原因となります。

頭部ユニット 目盛ノート

調整数値はあくまで目安になります。ベットの傾きやクッションの硬さにも影響がありますので、毎回微調整をしてからご使用ください。(コピーしてお使いください)


様		年 月 日
上下	前後	角度
センチ	センチ	ポジション
メモ		

様		年 月 日
上下	前後	角度
センチ	センチ	ポジション
メモ		

様		年 月 日
上下	前後	角度
センチ	センチ	ポジション
メモ		

様		年 月 日
上下	前後	角度
センチ	センチ	ポジション
メモ		

様		年 月 日
上下	前後	角度
センチ	センチ	ポジション
メモ		

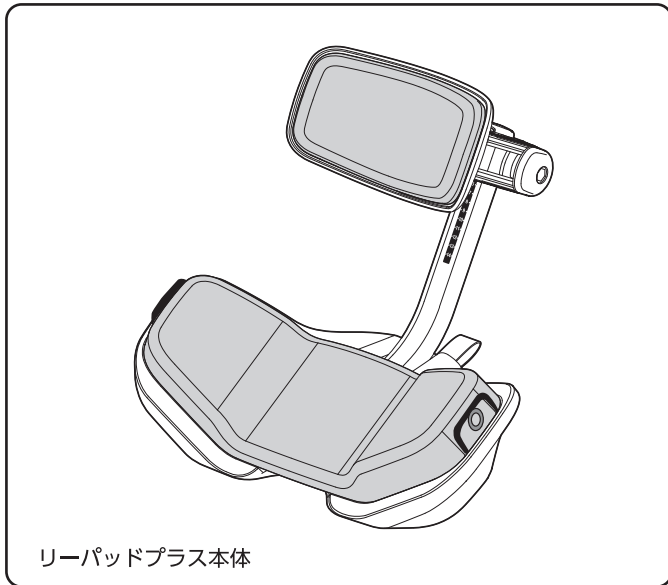

リーパッドプラス本体



専用ベルト

仕様

項目	内容
01 サイズ (全体)	幅45cm×奥行42cm×高さ40cm
02 サイズ (頭部パッド)	幅24cm×奥行7cm×高さ14cm
03 サイズ (背部パッド)	幅45cm×奥行13cm×高さ24cm
04 サイズ (専用ベルト)	幅140cm×奥行0.2cm×高さ15cm
05 重量	約2.1kg
06 材料 (プラスチック部)	PP / PC / POM
07 材料 (クッションカバー)	人工合皮
08 材料 (クッション内部)	ポリエチレン
09 材料 (パイプ)	マグネシウム合金
10 材料 (専用ベルト)	人工合皮

保証書

製品名 : リーパッド

保証期間 : お買上げ日から **本体 1年間**

お買上げ日 : 年 月 日

保証期間中は故障が発生した場合には、クッションなど消耗品の経年劣化を除き無償で交換させていただきます。
ただし、取扱説明書に記載した用途以外の使用や、記載事項を守らなかった場合は有料とさせていただきます。
修理をご依頼の際は保証書を添えてください。

お問い合わせ先

インターリハ株式会社

〒114-0016 東京都北区上中里 1-37-15
TEL(03)5974-0231 / FAX(03)5974-023

●お電話でのお問い合わせ

受付時間：平日 10：00～17：00（土日・祝日・弊社休業日を除く）

<http://www.irc-web.co.jp/>

第一営業所	〒114-0016 東京都北区上中里1-37-15	TEL 03-5974-0231
第二営業所		
仙台営業所	〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-38	TEL 022-727-2533
名古屋営業所	〒460-0012 名古屋市中区千代田5-22-12サンコート鶴舞 1F	TEL 052-252-7067
大阪営業所	〒530-0041 大阪市北区天神橋3-6-26扇町パークビル 3F	TEL 06-6356-5656
九州営業所	〒803-0861 北九州市小倉北区篠崎2-28-2	TEL 093-967-1858

2018.7