


## ご用意頂くもの

- ①ドローリング
- ②ロープリリース

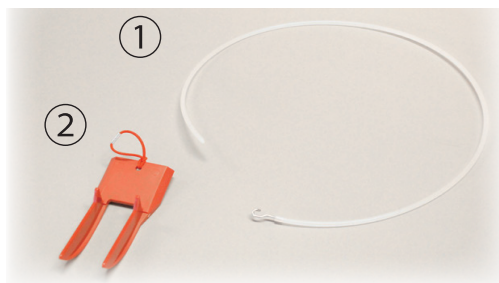

レッドコードトレーナー本体を平らな所に移します。  
吊った状態でも交換可能です。

## 交換手順:

1.ロープを持ち上げロープリリースを差し込みます。




2.注意事項の案内を外します。  
左周りに回すと外れます。




3.把手用スリング側を引っ張りロープをはずします。



4.ドローリングの先端のハリに交換用の新品ロープをひっかけ、器具の後ろ側よりレッドコード本体の穴に差し込んで押し込んでください。

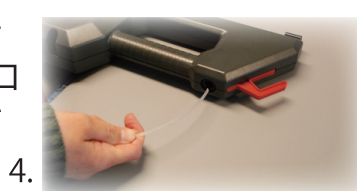

5.ロープがロープリリース側より出たら、交換用器具を外して完成です。

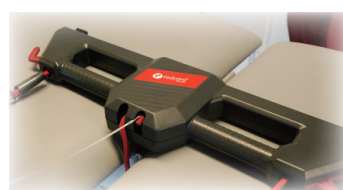

※取付が完了しましたら、必ず確認の為にレッドコードトレーナーを取りつけてロープが完全にかかるか体重を乗せて確認してください。

交換方法動画はこちら

