


<手順>

1. 分解

呼気チューブの取り外し


換気量計に接続されている 3 本の呼気チューブをすべて取り外します。

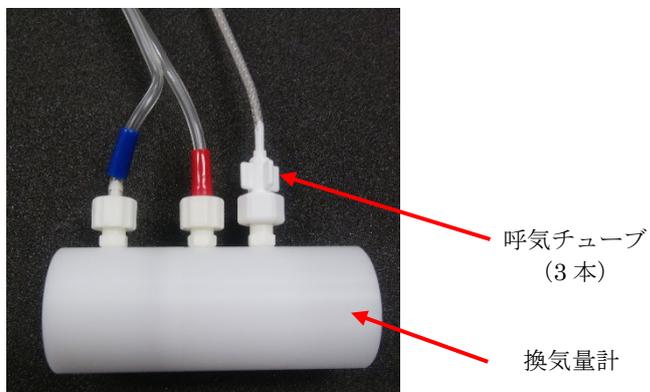

(取り外し方法)

・換気量計に接続している側の呼気チューブの付け根部分を反時計回りに回し、呼気チューブを取り外してください。

・取り外しの際には、写真の突起物の付近をねじるようにしてください。

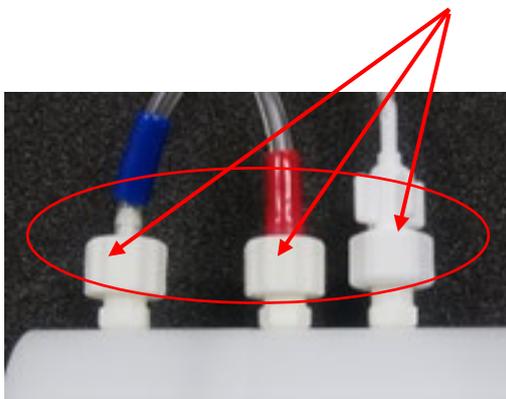

【分解後】



## 2. 洗浄、消毒

### ①換気量計の洗浄、消毒

呼気チューブを取り外した後、中性洗剤で付着物を前洗浄してください。その後、消毒用エタノールを用いて洗浄してください。洗浄後は、直射日光をさけて自然乾燥させてください。

※血液の付着など高度な汚染を受け、滅菌処理が必要と判断される場合には、中性洗剤で付着物の前洗浄を行った後、下記いずれかの方法にて滅菌をおこなってください。滅菌方法の詳細については製剤／機器メーカーが規定する使用方法に従ってください。

- a) 2W/V%グルタルアルデヒドを用いた化学的滅菌
- b) エチレンオキシドガス (EOG) によるガス滅菌

### ②呼気チューブの清拭

換気量計から取り外した後、接続部、チューブ表面を中性洗剤で清拭してください。


## 3. 各部品の点検

洗浄・消毒/滅菌後、各部品を注意深く点検し、損傷・消耗がないことを確認してください。経年劣化等により一部に変色がみられることがあります。ひび割れなどの劣化が見られる場合、継続使用せず新しいものと交換してください。

## 4. 組立て

各部品が完全に乾燥してから分解時と逆の手順にて換気量計と呼気チューブを接続し直してください。使用前に破損・劣化などのないことを確認してください。

### 呼気チューブ接続順序

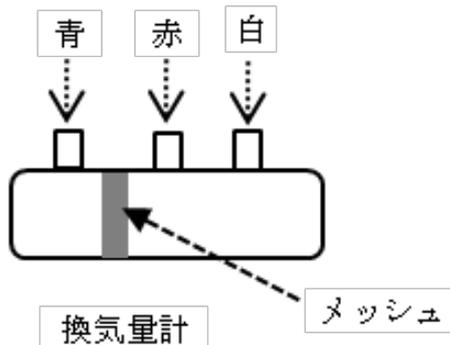

インターリハ株式会社

**Inter Reha**

Advanced Rehabilitation and Healthcare

〒114-0016 東京都北区上中里 1-37-15  
TEL: 03(5974)0231 FAX: 03(5974)0233  
<http://www.irc-web.co.jp> E-mail: [irc@irc-web.co.jp](mailto:irc@irc-web.co.jp)  
営業所: 仙台 / 東京 / 名古屋 / 大阪 / 九州 / フィジオセンター