



# インテレクトRPWモバイル



## 消毒方法（取説記載内容）

### 本体

湿らせた布で筐体の外側を拭いてください。石鹼水または中性洗剤を使用してください。

### ハンドピースのシャフト及び衝撃吸収部

アルコール洗浄剤及び消毒剤による殺菌

### 電動ユニット

超音波洗浄層で洗浄し殺菌

## 消毒方法 NG（取説記載内容）

本機器やチューブ内等に液体が浸透することがないように注意してください。

## 遵守しなかった場合

機器が恒久的に損傷する恐れがあります。

すぐに製造販売業者または取扱店にご連絡ください。

内部に水が入った機器は修理が完了するまで使用しないでください。



インターリハ株式会社

Inter Reha

Advanced Rehabilitation and Healthcare