



バイタルスティムプラス



消毒方法（取説記載内容）

本体

穏やかな抗菌剤で湿らせた、清潔で糸くずのない布を使って機器のお手入れをしてください。

さらに強力な滅菌のお手入れが必要な場合は、抗菌クリーナーで湿らせた布を使用してください。

液晶画面

液晶画面を拭くには、コンピュータのモニタ画面を拭く際に用いる清潔で乾燥した布を使用してください。

研磨材料、化学薬品、液体は使用しないでください。

消毒方法 NG（取説記載内容）

機器を液体の中に浸さないでください

遵守しなかった場合

誤って液体の中に入れてしまった場合は、製造販売業者または取扱店まで速やかにご連絡ください。

内部が濡れてしまった機器は、修理が終了するまで使用しないでください。



インターリハ株式会社

Inter Reha

Advanced Rehabilitation and Healthcare