



アペルゴ



消毒方法（取説記載内容）

日常のお手入れは乾いたタオル等で清拭してください。

汚れのひどい場合は、中性洗剤を水で薄め、やわらかい布に浸しかたく絞り、拭いてください。

その後は、水で湿らせた布でふき取り、乾いたタオルで乾拭きしてください。

消毒方法 NG（取説記載内容）

取説には未記載ですが、耐薬品性一覧表をご参考ください。

下記以外の薬剤での消毒は機器の動作を保証いたしかねますので、ご了承ください。

材料名		エタノール	イソプロピル アルコール	次亜塩素酸 ナトリウム	使用箇所
樹脂	ABS樹脂※1	○	○	△	本体カバ、底板
	フェノール	◎	○	△	ハンドル
	塩ビ樹脂(硬質)	○	○	◎	ハンドガード
ゴム	EPDM※1	◎	—	◎	負荷調整ダイヤル、ペダル
	シリコン	◎	◎	◎	モニタカバ

※1 ABS 樹脂、EPDM について、浸漬試験により評価を行い問題無いことを確認しています。

遵守しなかった場合

上記以外での消毒等により機器の動作不良、並びに破損については、保証いたしかねますので、ご了承ください。