

Cpex-1



消毒方法（取説記載内容）

本体

感電に注意して、本体部をからぶきしてください。本体内部への水分の侵入については十分に注意してください。

液晶画面のクリーニング

感電に注意して、本体部をからぶきしてください。本体内部への水分の侵入については十分に注意してください。

換気量計

各種チューブを換気量計から外し、水で薄めた台所用中性洗剤で洗浄した後、消毒用エタノールで洗浄してください。その後、直射日光をさけて自然乾燥させてください。

※血液の付着など高度な汚染を受け、滅菌処理が必要と判断される場合には、中性洗剤で付着物の前洗浄を行った後、下記いずれかの方法にて滅菌をおこなってください。

滅菌方法の詳細については製剤／機器メーカーが規定する使用方法に従ってください。

- a) 2W/V% グルタルアルデヒドを用いた化学的滅菌
- b) エチレンオキサイドガス（EOG）によるガス滅菌

呼気チューブ

換気量計から取り外した後、接続部、チューブ表面を中性洗剤で清拭してください。

呼気マスク

本体部接続コネクタから取り外し、水で薄めた台所用中性洗剤を薄めたぬるま湯で洗浄します。


その後、よくすすぎ、直射日光をさけて自

然乾燥させてください。その後、アルコール綿で接触部を拭いてください。

※滅菌対応の呼気マスクを滅菌する際は、汚れを洗浄し消毒後に、121℃15分の高圧蒸気滅菌を推奨します。

ヘッドネット

水で薄めた台所用中性洗剤を薄めたぬるま湯で洗浄します。その後、よくすすぎ、直射日光をさけて自然乾燥させてください。

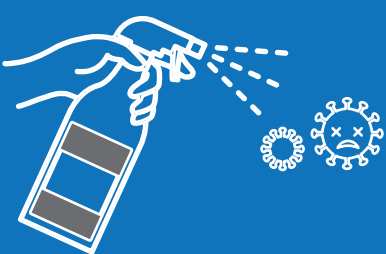

Cpex-1



消毒方法 NG（取説記載内容）

本体

機器を液体の中に沈めないでください。

換気量計

洗浄後は必ず乾燥した状態で使用してください。本体が稼働時に実施する際は、必ず呼気チューブの接続を外してから清掃を実施してください。

滅菌処理をする際は必ず指定の製剤を使用してください。

遵守しなかった場合

本体

センサ破損やセンサー感度に影響を及ぼす可能性があります。

センサに異常をきたした場合は正確な測定が行えなくなります。必ず記載の方法を遵守するようにしてください。