



デルシス



消毒方法（取説記載内容）

センサー

（使用前）アルコール綿でセンサー表面のほこり、油分などを清拭する。

必要に応じ、センサー貼付部位の皮膚も清拭を行う。

（使用后）各構成部品は、清潔な布などを用いて付着した遺物・汚れを除去し、消毒液を使用して清拭し、乾燥させる。

本製品は汗程度の水分に晒されても正常に動作いたします。

そのため、アルコールなどの消毒液を含ませた布、綿などでの清拭が可能です。

消毒方法 NG（取説記載内容）

本品に液体が侵入しないよう細心の注意を払うこと。

本製品は防水機能を有しておりません。

その為、液体中への投入による滅菌処理は決して行わないでください。

遵守しなかった場合

本品の使用により以下の不具合・有害事象を引き起こす可能性がある。

1) 不具合

動作不良、故障、モニタ不良、計測不良、破損、出力不良、断線、表示不良、発熱

2) 有害事象

火傷、痛み、かゆみ、皮膚炎、アレルギー、発赤、不快感、傷、感染

（添付文書より）

使用方法を遵守しなかった場合、センサーの動作不良、発熱などの不具合、また対象者に痛みなどの有害事象を引き起こす恐れがあります。