



# コグニバイク



## 消毒方法（取説記載内容）

### パソコンモニター・指紋認証センサー

乾いた柔らかい布で埃を取ったあと、アルコールか、アルコールがない場合は薄めた中性洗剤を含ませたよく絞った布で拭いてください。

水滴が残る場合はその後、乾拭きを行ってください。

### 本体

エタノールとイソプロピル系アルコール以外の有機溶剤（シンナー・ベンジン・工業用アルコール、酸性およびアルカリ性洗剤）は使用しないでください。

表面が溶けたり、曇ったりして、タッチパネル、指紋の読み込み等ができなくなる恐れがあります。

## 消毒方法 NG（取説記載内容）

### パソコンモニター・指紋認証センサー・本体

エタノールとイソプロピル系アルコール以外の有機溶剤（シンナー・ベンジン・工業用アルコール、酸性およびアルカリ性洗剤）は使用しないでください。

## 遵守しなかった場合

誤って有機溶剤を使用した場合、プラスチックの表面が溶けたり、ひび割れの原因になります。

周囲の隙間やコネクタ部の隙間から水などの液体が内部に入ると故障の原因になるため、水や洗剤を含んだ布はよく絞ってください。