



レッドコード



消毒方法（取説記載内容）

本体

中性洗剤・もしくは希釈したアルコール液に布を浸し硬く絞ってふき取りをしてください。
但し本体に関しては特に消毒の必要性はありません。

各種スリング

中性洗剤、もしくは次亜塩素酸水（400ppm）を希釈し（水3：次亜塩素酸1）洗浄、
もしくは布に浸し硬く絞り清拭。但し金属部位は水分を良くふき取ってください。

消毒方法 NG（取説記載内容）

本体

本体は決して水や消毒液を直接噴霧またはその中に入れることは避けてください。
内部の構造に錆が生じ強度に問題が出ます。
アルコールで清拭した場合本体の色落ちの可能性がありますが強度には問題ありません。

各種スリング

決してアルコールは使用しないでください。色落ちや、繊維が変化してスリングが切れてしまいます。

遵守しなかった場合

アルコールや紫外線は大変危険ですので置き場等にもご配慮ください。