



# タイロモーションシステム



## 消毒方法（取説記載内容）

### 本体

本体は非侵襲性の中性洗剤を浸した布を固く絞って拭き清浄してください。

### モニター

コンピュータのモニタ画面を拭く際に用いる清潔で乾燥した布を使用してください。

研磨材料、化学薬品、液体は使用しないでください。

毎日清潔に洗浄しておいてください。

### ディエゴ用アームスリング

各種スリングは中性洗剤、もしくは次亜塩素酸水(400ppm)を希釈し(水3:次亜塩素酸1)洗浄、もしくは布に浸し硬く絞り清拭。

アームサポートのアクリル板は取り外して清掃してください。

## 消毒方法 NG（取説記載内容）

本体は防水機構ではありませんので本体モジュール通気口等に水分上の物を噴霧したり直接液体をかけることは止めてください。

## 遵守しなかった場合

電気ショートや損傷の恐れがあります。

製造業者もしくは代理店にご連絡いただき修理・点検を受けてください。



インターリハ株式会社

Inter Reha

Advanced Rehabilitation and Healthcare